

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подматрасный клин для приподнятого положения верхней части тела

Изделие: Подматрасный клин

Материал: Фанера березовая шлифованная

Производитель: ООО «АЛСИД»

Сайт: www.alsid.ru

1. Назначение изделия

Подматрасный клин предназначен для создания наклона верхней части матраса и обеспечения комфортного приподнятого положения головы, плеч и грудной клетки во время отдыха и сна.

Изделие может использоваться в домашних условиях по рекомендации врача или по желанию пользователя для повышения комфорта сна.

2. Комплект поставки

- Подматрасный клин — 1 шт.
 - Распорки регулирующие — 4 шт.
 - Паспорт и руководство по эксплуатации — 1 шт.
-

3. Технические характеристики

- Материал: Фанера березовая шлифованная.
 - Цвет: белая береза.
 - Длина: 900 мм.
 - Варианты ширины: 800/ 900/ 1000/ 1200/ 1400 мм.
 - Высота регулируемая: 200/ 100/ 60 мм.
 - Углы наклона регулируемые: 12,5/ 6,1/ 3,5 градуса.
 - Масса (в зависимости от ширины): 6,7/ 7,5/ 8,4/ 10/ 11,7 кг.
 - Максимальная распределенная нагрузка: 150 кг.
 - Температура эксплуатации: от +5 °С до +40 °С.
-

4. Подготовка к эксплуатации

1. Установите вертикальные распорки в соответствующие пазы плоскостей, образовав клинообразную конструкцию (клин) с необходимым углом наклона. (необходимый угол наклона обеспечивается выбором и установки двух вертикальных распорок в соответствующие пазы плоскостей клина).
 2. Снимите матрас с кровати.
 3. Установите клин на основание кровати широкой частью к изголовью.
 4. Убедитесь, что клин расположен ровно и устойчиво.
 5. Уложите матрас поверх клина.
 6. Проверьте устойчивость матраса перед использованием.
-

5. Рекомендации по применению

Подматрасный клин обеспечивает приподнятое положение верхней части тела во время сна.

Такое положение может использоваться по рекомендации врача при состояниях, когда рекомендуется сон с приподнятым изголовьем, а также для повышения комфорта отдыха.

Изделие не является медицинским изделием и не заменяет консультацию врача.

6. Правила эксплуатации

- Используйте изделие только по назначению.
 - Размещайте клин на ровном основании кровати.
 - Не допускайте ударных нагрузок.
 - Не используйте поврежденное изделие.
 - Не подвергайте воздействию открытого огня и температур выше +60 °С.
 - Не допускайте длительного контакта с жидкостями.
-

7. Уход

При загрязнении протрите поверхность влажной тканью или щеткой без использования чистящего средства.

Протрите сухой тряпкой и просушите

8. Меры безопасности

Перед использованием убедитесь, что клин установлен без перекосов.

При появлении дискомфорта или ухудшении самочувствия прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.

9. Транспортирование и хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Беречь от прямых солнечных лучей и механических повреждений.

10. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего паспорта при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы: не менее 10 лет.

11. Сведения о производителе

Производитель: ООО «АЛСИД»

Адрес: 644065, г. Омск, ул. 3-я Заводская, д. 20, оф. 22

Телефон: +79293014071

E-mail: info@alsid.ru

Сайт: www.alsid.ru

Отметка о продаже

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____ Печать (при наличии)